



SECCO SYSTEMS KY

Hoivatekniikka jo vuodesta 1995

## IISI D Ovivalvontajärjestelmä

IISI D ovivalvontajärjestelmä on nimensä mukaisesti erittäin helppo asentaa toimintakuntoon ja vielä helpompi käyttää. Täysin vesitiiviit ja kevyet rannekkeet voi pitää joko ranteessa tai kiinnittää tarran avulla vaatteisiin. Hälytys voidaan siirtää talon muihin järjestelmiin, kuten hoitajakutsuun, dect puhelimiin tai vaikkapa GSM puhelimiin.

Vastaanottimet voivat toimia myös aivan itsenäisesti, sillä tarvittaessa niistä saadaan hyvin voimakas hälytysääni ja vilkkuva hälytysvalo.



SECCO SYSTEMS KY

Ulappasaarentie 4B  
00980 Helsinki  
FINLAND

Puh. 040-5 111 527  
Fax. 09-561 33 977  
secco@kolumbus.fi



## IISI D Dementiavalvontajärjestelmä – asennusohje

Huom! **IISI D** vastaanotin toimitetaan AINA valmiiksi ohjelmoituna. Huolehdi vain muista liitännöistä ja perussäädöistä.

Asenna IISI D vastaanotin oven karmiin lähelle kahvaa. Jos kyseessä on metalliovi, huomioi, että etäisyys metallikarmista pitää olla vähintään 30cm! Vastaanottimen takana on valmiina lujakiinnitteiset teipit, joilla sen pitäisi pysyä hyvin kiinni. Varmista tarvittaessa kiinnitys ruuveilla.

1. Kytke 12VDC:n käyttöjännite kuvan osoittamaan paikkaa **1**  
Käyttöjännite kytketään vain vastaanottimen 3-napaiseen liittimeen.
2. Kytke vastaanottimen mukana oleva ovimagneettikytkin kohdan **2** mukaisesti. Magneettikytkimen toinen pää CONTACT liittimeen ja toinen OV liitännään. Magneettikytkimen toinen kontakti liitetään oveen ja toinen oven karmiin.
3. Lisäsummeri ( jos tarvetta ) liitetään välille +12V ja ALARM ( COM ).  
ALARM liittimen kautta summeri saa maata hälytyksen ajan.
4. Täysin potentiaalivapaa hälytyslähde on saatavissa väliiltä 0V ja ALARM.
5. Vastaanottimen herkkyyttä voi säätää potentiometrillä **3**  
Vastaanottimen summeriäänän voimakkuutta säädetään pot.metristä **4**
6. Erillinen kiinteä kuittauspainike kytketään kohtaan **5**
7. Lähetinranneke kytketään päälle jääkaappimagneetilla
8. Rannekkeen pariston kestoikä on n. 1 vuosi. Merkitse ylös milloin rannekkeet on otettu käyttöön ja huolehdi paristojen toimivuudesta

Täydellinen kytkentäkuva lähetyksen mukana